



CATÁLOGO DE PRODUCTOS LIPEDEMA / LINFEDEMA

2023 / 2024

BAUERFEIND. POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS. PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Bauerfeind AG es uno de los principales fabricantes de productos ortopédicos. Con nuestros productos ponemos a las personas en movimiento y contribuimos significativamente a que conserven y recuperen su salud.

CONOCIMIENTO MÉDICO Y COMPETENCIA PROFESIONAL

Desde décadas desarrollamos productos de compresión para cuadros clínicos flebológicos y linfáticos. Esta experiencia la combinamos con un compromiso sin límites en la producción y asistencia al cliente, así como una gran creatividad en el desarrollo.

VARIEDAD EFECTIVA

Con los productos de tejido plano confeccionados a medida **VenoTrain curaflow**, podemos ofrecer a nuestros pacientes con linfedema y lipoedema un cuidado completamente individualizado con once variantes de color (caramelo, marino, antracita, negro, crema, espresso, royal, Wild Berry, Deep Petrol, Rich Olive y Flashy Papaya) y más de 1.000 combinaciones posibles entre productos y elementos añadidos. Los beneficios terapéuticos incluyen el alto contenido de microfibras en el tejido plano, las delicadas costuras planas y las zonas funcionales especiales, así como la corva extra suave.

Nuestra media de compresión **VenoTrain impuls** combina muchas ventajas: Con la microfibras transpirable y los fuertes hilos de compresión, ofrece una alta comodidad con un alto grado de actuación. La presión terapéutica necesaria se despliega incluso con movimientos mínimos.

La **manga de compresión VenoTrain soft** de tejido plano se emplea en caso de linfedemas leve en el brazo y, de manera preventiva, en caso de riesgo inminente de linfedema en el brazo por extracción del ganglio linfático de la axila o por radioterapia.

CALIDAD INCONDICIONAL

Los productos de Bauerfeind no solo cumplen simplemente con un estándar, sino que cumplen con los más altos requisitos de calidad, eficacia y comodidad. Lo confirman los procesos de inspección regulares, cuyos sellos y símbolos pueden llevar nuestros productos tras pasar las pruebas con éxito.

Todas las medias de compresión medicinales VenoTrain cuentan con el marcado CE y, por lo tanto, cumplen con los requisitos legales vigentes. Asimismo, cuentan con la marca de calidad alemana RAL y el sello de calidad OEKO-TEX STANDARD 100.

Desde el hilo hasta la confección final, nuestras medias de compresión medicinales se desarrollan y producen en Alemania.

* La lista completa de indicaciones se encuentra en las instrucciones de uso de VenoTrain adjuntas al producto.

● MADE
● IN
● GERMANY




EL SERVICIO DE BAUERFEIND EN EL QUE SIEMPRE PUEDE CONFIAR

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE LINFOLOGÍA

Estamos a su disposición por teléfono
Lu.-Ju. 08.30 am-06.30 pm,
Vi. 08.00 am-02.00 pm
(hora Península España)
Puede contactar con nosotros
por correo electrónico.

T +34 963 85 66 33
E info@bauerfeind.es

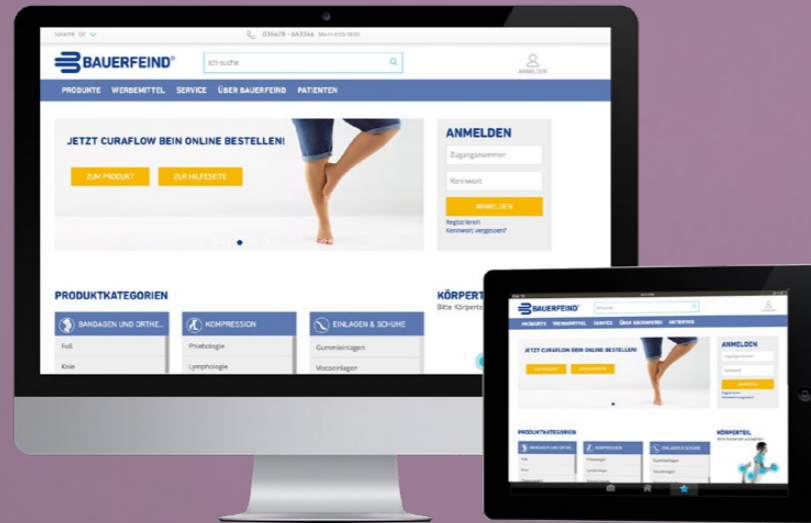

Realice su pedido online:
experts.bauerfeind.com

GARANTÍAS DE SERVICIO PARA EL COMERCIO ESPECIALIZADO EN ALEMANIA

LÍNEA DIRECTA GRATUITA DE TELÉFONO
¡Estaremos encantados de atenderle!

100 % LOCALIZABLE*
Como su colaborador competente estaremos a su disposición por teléfono Lu.-Ju. 08.30 am-06.30 pm, Vi. 08.00 am-02.00 pm (hora Península España). Puede contactar con nosotros por correo electrónico. * Excepto en caso de fallos en el sistema y trabajos de mantenimiento.

SISTEMAS DE PEDIDO ELECTRÓNICOS
Haga sus pedidos de forma rápida, fácil y con gastos de envío reducidos: A través de wheel-it o desde nuestras tienda online con numerosas funciones, como p.ej. el estado de pedido y la indicación sobre disponibilidad.

ENVÍO EN EL MISMO DÍA LABORABLE
Si hace su pedido antes de las 15.00 horas: la mercancía en stock se envía en el mismo día (a excepción de pedidos grandes). Estaremos encantados de acordar también sus peticiones de envíos urgentes.

FABRICACIÓN EXPRESS PARA UN TRATAMIENTO RÁPIDO Y A MEDIDA
Los pedidos a medida urgentes de Venotrain impuls (caramelo), que realice antes de las 10:00 horas, se confeccionarán y enviarán el mismo día laborable.

SIN GASTOS DE ENVÍO
Para valor de pedido superior a 200,00 €, al igual que para las confecciones a medida, asumimos los gastos de envío. De esta manera puede pedir todos los artículos de nuestra gama de productos en un pedido.

PLAZOS DE ENTREGA PRECISOS
Le indicaremos la fecha de entrega exacta de sus pedidos.

RECOGIDA GRATUITA DE LA MERCANCÍA
Envíenos por fax el formulario de devolución cumplimentado y tras la comprobación recogemos la mercancía asumiendo nosotros los gastos.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS DE 365 DÍAS
De acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Contratación, aceptaremos devoluciones de mercancías en un plazo de 365 días desde la fecha de envío.

PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES EN CINCO DÍAS
Procesamos sus devoluciones en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de recepción de la mercancía.

CONTENIDO

BAUERFEIND

TU CONTACTO EN LAS LÍNEAS DE TEJIDO CIRCULAR Y TEJIDO PLANO

Página 6

VISTA GENERAL DE COLORES DE LA LÍNEA DE LINFOLOGÍA
LAS MEDIAS ADECUADAS PARA CADA PERSONA

Página 8

PROPIEDADES DEL PRODUCTO


HECHO PARA EL DÍA A DÍA

Página 8

TERMINACIONES Y LIGAS
SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

Página 9

PIERNA & PIE

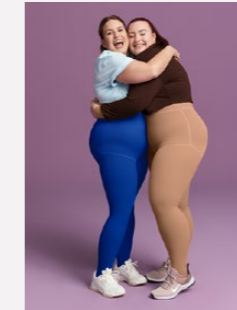

- 11 **Concepto de tratamiento**
- 12 **VenoTrain® impuls**
Producto de serie y a medida
- 14 **VenoTrain® delight**
Producto de serie y a medida + Accesorios
- 18 **VenoTrain® curaflow**
Producto a medida + Elementos añadidos para el cuidado de las piernas disponibles con VenoTrain curaflow

25 **Tipos de cuña**

BRAZO & MANO



- 27 **Concepto de tratamiento**
- 28 **VenoTrain® soft**
Producto de serie
- 30 **VenoTrain® curaflow**
Producto a medida + Elementos añadidos para el tratamiento de los brazos

ACCESORIOS

- 34 **Accesorios**
- 35 **VenoTrain® glider**

PRESCRIPCIÓN Y PEDIDO

- 36 **Modificaciones | Reparaciones**
- 38 **Ejemplos de prescripción | Recomendaciones de prescripción**
- 39 **Hojas de pedido**
- 40 **Otras áreas de productos de Bauerfeind**

BAUERFIEND:

Tu contacto en las líneas de tejido circular y tejido plano.

- + Nos complace presentarte a Mónica Belda, experta reconocida en el campo y encargada de brindarte un asesoramiento técnico de primera categoría.
- + En **Bauerfiend**, nos enorgullece ofrecerte soluciones de tejidos de calidad impecable y un servicio excepcional. Nuestro compromiso con la excelencia nos impulsa a superar tus expectativas y asegurarnos de que recibas productos y asesoramiento que se ajusten perfectamente a las necesidades de clientes y pacientes.

- + Para comunicarte con Mónica, te facilitamos los siguientes contactos:

Email: monica.belda@bauerfeind.es
Móvil: +34 692 52 56 41

- + Confía en la trayectoria de Bauerfiend para alcanzar tus metas. Nuestra experiencia en compresión terapéutica, optimización deportiva y bienestar general nos convierte en tu aliado ideal.

- + No dudes en aprovechar esta oportunidad única de recibir el respaldo de Mónica y el equipo de Bauerfiend. Contáctanos hoy mismo y permítenos brindarte el apoyo técnico y la calidad excepcional que te mereces. Estamos aquí para servirte.



VISTA GENERAL DE COLORES DE LA LÍNEA DE LINFOLOGÍA

LAS MEDIAS ADECUADAS PARA CADA PERSONA

VenoTrain®	COLORES ESTÁNDAR				COLORES ADICIONALES			COLORES DE MODA NUEVO			
	Caramelo	Marino	Antracita	Negro	Crema	Espresso	Royal	Wild Berry	Deep Petrol	Rich Olive	Flashy Papaya
impuls	●	●	●	●				●	●		
delight	●			●							
curaflow	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
soft para brazo	●			●							



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

HECHO PARA EL DÍA A DÍA

VenoTrain curaflow

- Tejido suave para una cómoda colocación y agradable sensación de uso
- Material extrasuave en poplíteo que permite una perfecta adaptación, aumentando la movilidad y confortabilidad
- Estructura longitudinal inteligente para lograr el óptimo transporte de la linfa
- Presión constante óptima distribución de la presión con un efecto perceptible durante todo su uso, agradable tejido de doble tracción, suave y de malla fina
- Adaptación perfecta a las medidas individuales, gracias a las costuras anatómicas confeccionadas a medida

VenoTrain curaflow

PROPIEDADES ADICIONALES

- Tejido transpirable y regulador de la humedad gracias a la microfibras para una agradable comodidad de uso

TERMINACIONES Y LIGAS

SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN COMODIDAD

TERMINACIONES



TERMINACIÓN CON COMPRESIÓN

Terminación con tejido compresivo sin silicona ni costuras adicionales.

Disponible con VenoTrain curaflow



TEXTIL CON BANDA ELÁSTICA INTERNA AJUSTABLE

La terminación viene como la opción estándar, si no indica otra.

Disponible con VenoTrain curaflow y VenoTrain impuls



CINTURILLA

Terminación plana con cinta elástica sin revestimiento de silicona y con una gran comodidad de uso.

Disponible con VenoTrain curaflow



TERMINACIÓN POROSA

Presión reducida al principio y/o al final del tratamiento con medias; transición suave cuando se solapan varios tratamientos.

Disponible con VenoTrain delight y VenoTrain curaflow

LIGAS DE SUJECIÓN



MICROMOTAS

La liga es extremadamente elástica y con sus pequeñas motas planas casi ni se nota que se lleva puesta incluso con ropa ajustada, y el material es respetuoso con la piel, que, gracias a su superficie suave, se adapta perfectamente al contorno de la pierna.

Disponible con VenoTrain curaflow



LIGA AUTOFIJANTE A MOTAS

Nuestra liga de sujeción clásica ofrece a los pacientes una sujeción firme y es respetuosa con la piel.

Disponible con VenoTrain impuls, VenoTrain delight, VenoTrain curaflow



LIGA DE TIRAS DE SILICONA

La liga de sujeción está recubierta con tres rayas planas y ofrece una sujeción reforzada con un tejido más recio y mayores contornos.

Disponible con VenoTrain curaflow



CONCEPTO DE TRATAMIENTO* PIERNA & PIE

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su paciente. La elección de la media de compresión y de la clase de compresión debe realizarse siempre teniendo en cuenta la situación individual de cada paciente, así como sus necesidades. En caso de duda, póngase directamente en contacto con nosotros.

LINFEDEMA

ESTADIOS

Diagnóstico / molestias

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

VenoTrain® impuls
tejido circular

VenoTrain® delight
tejido plano

VenoTrain® curaflow
tejido plano

<p>ESTADIO 0 ESTADIO DE LATENCIA</p> <p>El sistema linfático está dañado, aunque aún no hay edemas visibles o palpables.</p>	<p>ESTADIO 1 REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE</p> <p>El tejido es blando y, si hay edema visible, desciende al presionarlo ligeramente. El linfedema remite al mantener las piernas en una posición elevada.</p>	<p>ESTADIO 2 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE</p> <p>El tejido conjuntivo duro y, cuando aparece edema, ya no se puede presionar u opone mucha resistencia. El paciente puede sufrir limitaciones de movimiento.</p>	<p>ESTADIO 3 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE</p> <p>Marcado aumento del tamaño del edema, con dimensiones extremas en algunos puntos.</p>
---	---	--	--

LIPOEDEMA

ESTADIOS

Diagnóstico / molestias

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

VenoTrain® impuls
tejido circular

VenoTrain® delight
tejido plano

VenoTrain® curaflow
tejido plano

<p>ESTADIO 1</p> <p>La superficie de la piel es lisa, el tejido graso subcutáneo espeso y la estructura de la grasa presenta nódulos finos.</p>	<p>ESTADIO 2</p> <p>La superficie de la piel es irregular y la estructura de la grasa presenta nódulos gruesos.</p>	<p>ESTADIO 3</p> <p>Además, en el estadio 2 el tejido es más espeso y duro. Presenta depósitos grasos con deformidad y de gran extensión.</p>
--	--	--

Ccl 1: 18 – 21 mmHg
• Compresión suave
• Tratamiento de linfedema infantil, edema por inactividad

Ccl 2: 23 – 32 mmHg
• Compresión media
• Efecto superficial medio
• Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 1 y 2, lipoedemas, lipoedema con linfedema secundario

Ccl 3: 34 – 46 mmHg
• Compresión fuerte
• Efecto superficial intenso
• Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 2 y 3, lipoedemas, lipoedema con linfedema secundario

Ccl 4: a partir de 49 mmHg
• Compresión extra-fuerte
• Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en la pierna en los estadios 2 y 3, lipoedemas y lipoedema con linfedema secundario

* Representación esquemática

VenoTrain® impuls

Máxima eficacia para linfedema incipiente



La modelo lleva medias calcetín (AG) de color marino

Instrucciones para el cuidado



TABLA DE TALLAS DE SERIE V6+

	CONTORNO	I		II		III		IV		V		VI		
		NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	
Longitud lG														
short	62-70													
long	70-80													
Tipo	AG													
Longitud lD														
short	35-40													
long	40-44													
Tipo	AD													
		cG	45-53	51-59	48-56	54-62	51-59	57-66	54-63	60-69	57-66	63-73	60-70	66-76
		cF	39-45	43-50	42-49	46-53	45-52	49-57	48-56	52-60	51-59	55-64	54-63	58-67
		cE	32-37	35-40	34-39	37-42	36-41	39-44	38-44	41-47	40-46	43-49	42-48	45-51
		cD	28-32	30-34	30-34	32-37	32-37	34-39	34-39	36-41	36-41	38-43	38-43	40-46
		cC	29-33	31-35	31-35	33-38	33-38	35-40	35-40	37-42	37-42	39-44	39-44	41-47
		cB1	23-27	24-28	25-29	26-30	27-31	28-32	29-34	30-35	31-36	32-37	33-38	34-39
		cB	19-20,5		20,5-22		22-24		24-26		26-28,5		28,5-31	
		cY	25-29		26-31		28-33		30-35		32-38		35-41	
		cA	19-22		20-23		22-25		24-27		26-30		28-33	


* Todas las medidas se indican en cm



Media de compresión corta (AD) con puntera cerrada en color marino



Media de compresión larga (AG) con puntera abierta en color caramelo

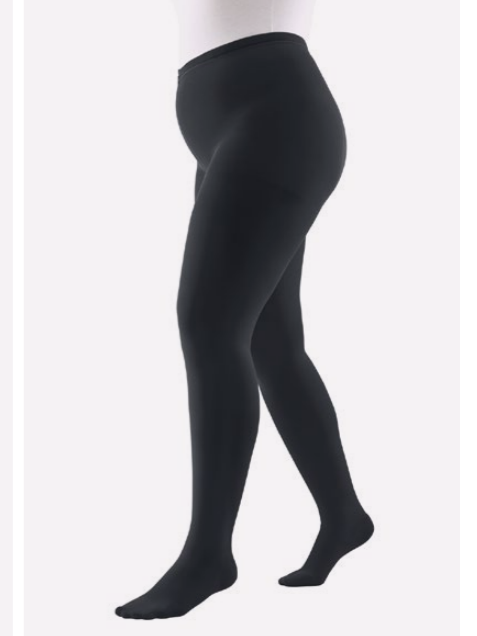

Panti (AT) con puntera cerrada en color antracita

PROPIEDADES

- El tejido de elasticidad reducida proporciona una elevada presión de trabajo incluso con un mínimo movimiento muscular
- El material de microfibra respetuoso con la piel hace que el producto sea transpirable y proporciona una regulación térmica
- Sistema de tallas V6+ (I-VI) muy diferenciado
- Medida de fabricación exprés en color caramelo
- Los pedidos a medida urgentes de VenoTrain impuls (caramelo), que realice antes de las 10:00 horas, se confeccionarán y enviarán el mismo día laborable

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: V6+ (I-VI)

Clases de compresión:

Ccl 2 (23-32 mmHg)

Ccl 3 (34-46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada

Elementos añadidos: consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano

Ccl 3: 75 % poliamida, 25 % elastano

Colores:

Colores estándar

CARAMELO



MARINO



ANTRACITA



NEGRO



Colores de moda

WILD BERRY



DEEP PETROL



● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA

	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Borde de punto	● ○			○	○	○
Mota	● ○	● ○				
Fijación a la cadera			● ○			

experts.bauerfeind.com/venotrain-impuls

VenoTrain® delight

para una terapia intensiva



La modelo lleva medias calcetín (AG) de color caramelo

Instrucciones para el cuidado



TABLA DE TALLAS DE SERIE

Tipo	AD	CONTORNO						
Longitud (D)		I	II	III	IV	V	VI	
short	35-39	cD	28-34	30-37	32-39	34-41	36-43	38-46
long	40-44	cC	29-35	31-38	33-40	35-42	37-44	39-47
Pie short:	tallas 36 - 41	cB1	23-28	25-30	27-32	29-35	31-37	33-39
		cB	19-20,5	20,5-22	22-24	24-26	26-28,5	28,5-31
Pie long:	tallas 41-46	cY	25-29	26-31	28-33	30-35	32-38	35-41
		cA	19-22	20-23	22-25	24-27	26-30	28-33

* Todas las medidas se indican en cm



Pie recto cerrado

Liga autofijante a motas (AD) en color caramelo

PROPIEDADES

- Acción profunda sobre el sistema venoso
- Tejido de doble tracción transpirable
- Estructura gripRelief® especial en el reborde, para una sujeción cómoda y segura
- Costuras especialmente planas

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: de serie y a medida

Clases de compresión:

Ccl 2 (23-32 mmHg)
Ccl 3 (34-46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada, abierta en diagonal

Elementos añadidos: consultar

Colores:

Colores estándar

CARAMELO



NEGRO



COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
Ccl 3: 79 % poliamida, 21 % elastano

● SERIE

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN LIGA	AD	AF	AG	AT	ET	CT	BD	BG	CG	DG
Liga de sujeción	●○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mota (3 cm)	●○									
Mota (5 cm)	●○	○	○				○	○	○	○
Fijación a la cadera			○							
PUNTERA										
Abierta	●○	○	○	○						
Cerrada	●○	○	○	○						
Diagonal abierta	○	○	○	○						
ELEMENTOS AÑADIDOS										
Talón en T	●○*	○*	○*	○						
Almohadillas viscoelásticas	○*	○*	○*							

* Opcionalmente con talón en T o almohadillas

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight

ELEMENTOS AÑADIDOS PARA PIERNA & PIE

(VenoTrain delight)

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
<p>Fijación a la cadera</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Intolerancia a las ligas de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • Función de sujeción • Garantiza el ajuste correcto del producto en todo momento
<p>Pie oblicuo</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dorso del pie edematoso • Malas posturas de los dedos • Enfermedades de la piel y uñas en la zona de los dedos 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas • Forma anatómica • Fijación distal • Evitar la constricción circular y el desarrollo de edema en el antepié
<p>Pie recto (cerrado)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dorso del pie edematoso • Malas posturas del pie y dedos • Pie delgado que se estrecha en la dirección hacia el talón 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención del deslizamiento del pie y/o del talón hacia atrás • Puntera muy cómoda, suave
<p>Talón en T</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pliegues de la piel en Y • Talón anatómico marcado • Actividad predominantemente sedentaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Sin formación de arrugas en el talón y empeine • Distribución de la compresión mejorada en la zona del tobillo • Mejora de la funcionalidad articular
<p>Almohadilla</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Edemas y endurecimientos en la zona del tobillo • Dependiendo de la indicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento la presión localizada • Prevención de edemas y endurecimientos • Disminución de la fibrosis



VenoTrain® curaflow

La media de compresión para el tratamiento de linfedemas y lipoedemas en la pierna

Video didáctico
video.bauerfeind.com




La modelo lleva una media de compresión larga (AG) con liga autofijante a motas en color Flashy Papaya

Instrucciones para el cuidado



Media larga (AG) con puntera abierta en color caramelo

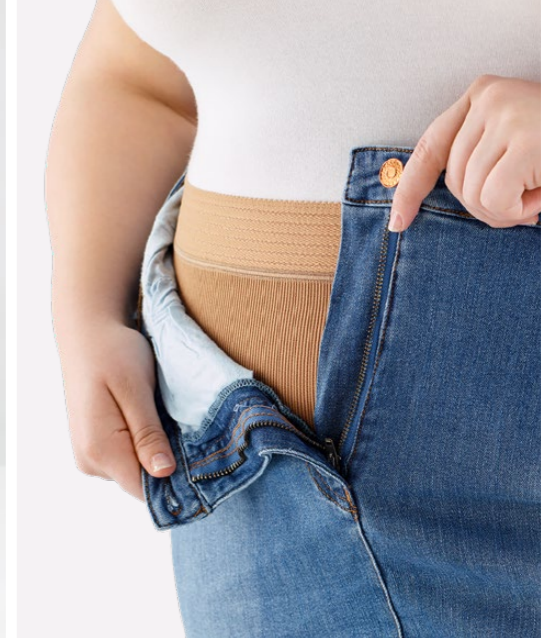

Panti (AT) con cinturilla en color caramelo

PROPIEDADES

- Microfibra suave que facilita su colocación
- El material de microfibra respetuoso con la piel hace que el producto sea transpirable y proporciona una regulación térmica
- Costuras planas delicadas
- Puntera extra-suave
- Corva anatómica y extra-suave para una total libertad de movimiento
- Confección a medida para necesidades individuales

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:

Ccl 1 (18–21 mmHg) hasta
Ccl 4 (a partir de 49 mmHg)

Puntera: abierta, abierta en diagonal, cerrada, cerrada en diagonal

Elementos añadidos: consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1–2: 73 % poliamida, 27 % elastano

Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano

Ccl 4: 65 % poliamida, 35 % elastano

Capuchón para los dedos del pie sin costuras

Ccl 1: 87 % poliamida, 13 % elastano

Ccl 2: 85 % poliamida, 15 % elastano

Ccl 3: 86 % poliamida, 14 % elastano

Capuchón para los dedos del pie con costura:

Ccl 1–2: 73 % poliamida, 27 % elastano

Colores:

Colores estándar

CARAMELO



MARINO



ANTRACITA



NEGRO



Colores adicionales

CREMA



ESPRESSO



ROYAL



Colores de moda

WILD BERRY



DEEP PETROL



RICH OLIVE



FLASHY PAPAYA



CONFECCIÓN A MEDIDA



AA1



AB



AB1



AD



AF



AG



AT



BT



BIT



CT



ET



FT



ATE



B1G



BD



BG



CG

<https://experts.bauerfeind.com/curaflow-leg>

Linfedema estadio 0

Linfedema / Lipoedema estadio 1

Linfedema / Lipoedema estadio 2

Linfedema / Lipoedema estadio 3

ELEMENTOS AÑADIDOS PARA PIERNA & PIE

(VenoTrain curaflow)




VenoTrain curaflow permiten una confección a medida para una adaptación personalizada de los productos a las necesidades del paciente. Los elementos añadidos para el producto aquí indicados representan las opciones adicionales preferidas.

Nuestro extenso programa de confección a medida incluye en total más de 1000 combinaciones de producto diferentes. Puede información sobre otros elementos añadidos disponibles en nuestra lista de precios actual.

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Pie recto (abierto) 	<ul style="list-style-type: none"> Para una anatomía discreta 	<ul style="list-style-type: none"> Para una mejor circulación del aire en la zona del antepié
Pie oblicuo (abierto) 	<ul style="list-style-type: none"> Dorso del pie edematoso Malas posturas de los dedos Enfermedades de la piel y uñas en la zona de los dedos 	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas Forma anatómica Fijación distal Evitar la constricción circular y el desarrollo de edema en el antepié
Pie recto (cerrado) 	<ul style="list-style-type: none"> Dorso del pie edematoso con una línea de contorno de los dedos relativamente recta 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención del deslizamiento del pie y/o del talón hacia atrás Evitar la hiperpresión en la zona de los dedos Puntera muy cómoda, suave
Pie oblicuo (cerrado) 	<ul style="list-style-type: none"> Dorso del pie edematoso Malas posturas del pie y dedos 	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de presión necesaria en las articulaciones metatarsianas Forma anatómica Prevención del deslizamiento del pie y/o del talón hacia atrás Evitar la hiperpresión en la zona de los dedos Puntera muy cómoda, suave

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Hallux 	<ul style="list-style-type: none"> Deformación lateral del dedo grande (Hallux valgus) 	<ul style="list-style-type: none"> Óptima adaptación en la zona del hallux Descargan la presión
Talón a 90° 	<ul style="list-style-type: none"> Pliegues de la piel en Y Talón anatómico marcado Usuarios de sillas de ruedas y actividades predominantemente sedentarias o estáticas de bipedestación Para realizar actividades de la vida diaria 	<ul style="list-style-type: none"> Sin formación de arrugas en el talón y empeine Distribución de la compresión mejorada en la zona del tobillo Mejora de la funcionalidad articular
Ampliación del puente 	<ul style="list-style-type: none"> Transiciones en Y Empeine elevado Estadio de linfedema final 2 / comienzo 3 	<ul style="list-style-type: none"> Menor presión sobre los tendones elevadores del pie Compresión mejorada en la parte posterior del pie
Guante para los dedos sin costuras 	<ul style="list-style-type: none"> Linfedema en antepié y dedos Edema del dorso del pie 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos Mayor aceptación gracias a la comodidad de uso
Guante para los dedos con costuras 	<ul style="list-style-type: none"> Linfedema en antepié y dedos Edema del dorso del pie 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos
Guante para los dedos con anillos 	<ul style="list-style-type: none"> Linfedema en antepié y dedos Edema del dorso del pie 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Puntera cosida a la media 	<ul style="list-style-type: none"> • Linfedema en antepié y dedos • Edema del dorso del pie 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de edemas en la zona del antepié y dedos • Sin superposición de la media y la zona para los dedos
Almohadilla incorporada 	<ul style="list-style-type: none"> • Edemas y endurecimientos en la zona del tobillo 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento la presión localizada • Prevención de edemas y endurecimientos
Almohadilla linfática incorporada 	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento localizado del edema o endurecimiento • Divergencias del estándar anatómico 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento la presión localizada • Prevención de edemas y endurecimientos
Forro 	<ul style="list-style-type: none"> • Irritación de la piel en zonas de articulación como tobillo y rodilla, piel apergaminada 	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de la piel sensible contra fricciones • Reducción de la fricción y el estrés mecánico • Fijación de las almohadillas
Zona funcional Estándar para todos los tratamientos de la pierna en la zona de la rodilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Principalmente en pacientes con lipoedema o linfedema 	<ul style="list-style-type: none"> • Material extrasueva en la corva para reducir la formación de pliegues • Forma anatómica para una mejora de las funcionalidades articulares
Terminación oblicua en la rodilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Principalmente en pacientes con lipoedema o linfedema • Forma cónica anatómica • Tejido cutáneo blando 	<ul style="list-style-type: none"> • Distribución mejorada de la compresión en la zona final de la media (AD) • Forma anatómica

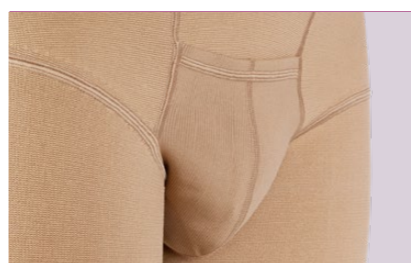ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Terminación oblicua en el muslo 	<ul style="list-style-type: none"> • Principalmente en pacientes con lipoedema o linfedema • Forma cónica anatómica • Tejido cutáneo blando 	<ul style="list-style-type: none"> • Evita la constricción circular de los vasos linfáticos • Distribución mejorada de la compresión en la zona final de la media (AG) • Forma anatómica
Elevación de la pierna por delante sólo en combinación con el cierre en ángulo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pacientes con muslos voluminosos y edematosos 	<ul style="list-style-type: none"> • Prevención de la constricción • Curso fisiológico de la presión hasta la ingle
Pieza de liga de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • Forma de la pierna cónica acentuada • Tejido muy blando 	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeción adicional
Entrepierna para caballero Estándar 	<ul style="list-style-type: none"> • Medias para el tratamiento para hombre 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste mejorado en la zona abdominal

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Abertura para estoma 	<ul style="list-style-type: none"> • Abdomen 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite el acceso a drenajes / líneas externos
Cuña ATU 	<ul style="list-style-type: none"> • Embarazo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste mejorado en la zona abdominal • Reducción de la compresión en la zona del abdomen
Fijación a la cadera 	<ul style="list-style-type: none"> • Intolerancia a las ligas de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeción de las medias de compresión
Cremallera 	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de grandes diferencias entre la cadera y la cintura • En caso de paresia flácida 	<ul style="list-style-type: none"> • Más fácil de poner y de quitar

TIPOS DE CUÑA

Cuña estándar sin protección de lavado



Se trata de la disposición estándar que, con una sola capa de tejido, se adapta bien al uso de productos sanitarios y evita cortes en la zona íntima.

Cuña estándar con protección de lavado



Gracias a la doble capa de tejido, no se producen roces ni irritaciones en la zona íntima. Además, sirve para absorber el sudor y las secreciones, reduciendo así el riesgo de infecciones.

Cuña con compresión sin protección de lavado



Su excelente ajuste evita el deslizamiento y permite una mejor adaptación del tejido plano.

Cuña con compresión con protección de lavado



Su excelente ajuste evita el deslizamiento y permite una mejor adaptación del tejido plano. La doble capa de tejido también evita la fricción y la irritación de la piel en la zona íntima. Además, sirve para absorber el sudor y las secreciones, reduciendo así el riesgo de infecciones. Óptima opción para linfedemas con afectación genital.

Cuña abierta con compresión



Permite el uso posoperatorio en pacientes con sondas y facilita ir al baño.



CONCEPTO DE TRATAMIENTO* BRAZO Y MANO

Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la media de compresión VenoTrain adecuada para su paciente. La elección de la media de compresión y de la clase de compresión debe realizarse siempre teniendo en cuenta la situación individual de cada paciente, así como sus necesidades. En caso de duda, póngase directamente en contacto con nosotros.

LINFEDEMA

ESTADIOS

Diagnóstico / molestias

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

VenoTrain® soft
tejido circular

VenoTrain® curaflow
tejido plano



ESTADIO 0 ESTADIO DE LATENCIA

El sistema linfático está dañado, aunque aún no hay edemas visibles o palpables.



ESTADIO 1 REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE

El tejido es blando y, si hay edema visible, desciende al presionarlo ligeramente.



ESTADIO 2 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE

El tejido conjuntivo duro y, cuando aparece edema, ya no se puede presionar u oponer mucha resistencia.



ESTADIO 3 NO REVERSIBLE ESPONTÁNEAMENTE

Marcado aumento del tamaño del edema, con dimensiones extremas en algunos puntos.

LIPOEDEMA

ESTADIOS

Diagnóstico / molestias

RECOMENDACIÓN DE PRODUCTO

VenoTrain® soft
tejido circular

VenoTrain® curaflow
tejido plano



ESTADIO 1

La superficie de la piel es lisa, el tejido graso subcutáneo espeso y la estructura de la grasa presenta nódulos finos.



ESTADIO 2

La superficie de la piel es irregular y la estructura de la grasa presenta nódulos gruesos.



ESTADIO 3

Además, en el estadio 2 el tejido es más espeso y duro. Presenta depósitos grasos con deformidad y de gran extensión.

CLASES DE COMPRESIÓN

Ccl 1: 18–21 mmHg
• Compresión suave

Ccl 2: 23–32 mmHg
• Efecto superficial medio
• Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en el brazo en los estadios 1 y 2, lipoedemas, lipoedema con linfedema secundario

Ccl 3: 34–46 mmHg
• Efecto superficial intenso
• Tratamiento de linfedemas primarios y secundarios en el brazo en los estadios 2 y 3, lipoedemas, lipoedema con linfedema secundario

* Representación esquemática

Manga de compresión **VenoTrain® soft**

Libertad de movimientos en la vida cotidiana




La modelo lleva la manga de compresión (CG) con liga autofijante a motas en color beige

Instrucciones para el cuidado



TABLA DE TALLAS DE SERIE VenoTrain® soft brazo

Longitud (D)	CONTORNO	S	M	L	XL
		MÍN - MÁX	MÍN - MÁX	MÍN - MÁX	MÍN - MÁX
short 39-44	cG	24 - 30	27 - 33	29 - 36	32 - 40
long 44,1-50	cE	22 - 26	24 - 29	27 - 32	30 - 35
Tipo CG	cC	14 - 15	15 - 16,5	16,5 - 18	18 - 20

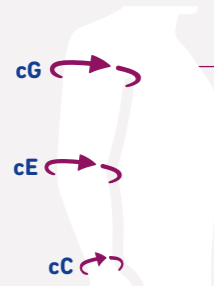

* Todas las medidas se indican en cm



Zona funcional en el pliegue del codo en color beige



Borde de punto de color beige

PROPIEDADES

- Diseño cómodo en la cara interna del codo para una mayor libertad de movimiento y comodidad de uso, y una menor sensación de presión
- Efectividad perceptible durante todo su uso
- Respetuoso con la piel, suave y transpirable

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas:

VenoTrain soft brazo (S-XL)

Clases de compresión:

Ccl 1 (18-21 mmHg)

Ccl 2 (23-32 mmHg)

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1: 74 % poliamida, 26 % elastano

Ccl 2: 69 % poliamida, 31 % elastano

Colores:

Colores estándar

BEIGE

CARAMELO

NEGRO



INDICACIONES

- Edema postquirúrgico
- Trombosis venosa profunda de miembro superior
- Linfedema estadios 0-1
- Lipoedema estadio 1

● SERIE

TERMINACIÓN LIGA

Borde de punto

Mota



CG



experts.bauerfeind.com/venotrain-soft

Linfedema estadio 0

Linfedema / Lipoedema estadio 1

Linfedema / Lipoedema estadio 2

Linfedema / Lipoedema estadio 3

VenoTrain® curaflow

La media de compresión para el tratamiento de linfedemas y lipoedemas en brazos y manos



Vídeo didáctico
video.bauerfeind.com



La modelo lleva la manga de compresión (CG) y el guante sin costuras (AC1) en color royal.

Instrucciones
para el cuidado



Guante (AC1) sin costura con puntas de los dedos abiertas en color royal

Manga de compresión (CG) de color caramelo

PROPIEDADES

- Microfibra suave que facilita su colocación
- El material de microfibra respetuoso con la piel hace que el producto sea transpirable y proporciona una regulación térmica
- Zona del codo anatómica y especialmente suave para una mayor libertad de movimiento y comodidad de uso, y una menor sensación de presión
- Confección a medida para necesidades individuales

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:

Ccl 1 (18–21 mmHg) hasta
Ccl 3 (34–46 mmHg)

Elementos añadidos: consultar

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Brazo:

Ccl 1: 77 % poliamida, 23 % elastano
Ccl 2: 77 % poliamida, 23 % elastano
Ccl 3: 73 % poliamida, 27 % elastano

Mano sin costuras:

Ccl 1: 87 % poliamida, 13 % elastano
Ccl 2: 85 % poliamida, 15 % elastano
Ccl 3: 86 % poliamida, 14 % elastano

Mano con costuras:

Ccl 1: 73 % poliamida, 27 % elastano
Ccl 2: 73 % poliamida, 27 % elastano
Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano

Colores:

Colores estándar

CARAMELO



MARINO



ANTRACITA



NEGRO



Colores adicionales

CREMA



ESPRESSO



ROYAL



Colores de moda

WILD BERRY



DEEP PETROL



RICH OLIVE



FLASHY PAPAYA



CONFECCIÓN A MEDIDA



ELEMENTOS AÑADIDOS PARA BRAZO Y MANO

VenoTrain curaflow permite una confección a medida para una adaptación personalizada de los productos a las necesidades del paciente. Los elementos añadidos para el producto aquí indicados representan las opciones adicionales preferidas. Nuestro extenso programa de confección a medida incluye en total más de 1000 combinaciones de producto diferentes.

Encontrará más información sobre los elementos añadidos disponibles en nuestra lista de precios actual o puede pedirlos directamente en la tienda online de Bauerfeind.

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Zona funcional Estándar para todos los tratamientos de brazo 	<ul style="list-style-type: none"> Principalmente en pacientes con lipoedema o linfedema 	<ul style="list-style-type: none"> Zona funcional incorporada en la corva para reducir la formación de pliegues Forma anatómica para una mejora de la funcionalidad articular
Codo 160°, 150° o 135° 	<ul style="list-style-type: none"> 160°: como estándar 150°: trabajo permanente con flexión del codo 135°: pacientes que ya no pueden tener el codo en extensión completa 	<ul style="list-style-type: none"> Reducción de las arrugas en la zona de flexión y, por tanto, prevención del estrangulamiento
Terminación oblicua 	<ul style="list-style-type: none"> Principalmente en pacientes con lipoedema o linfedema Forma anatómica Tejido cutáneo blando 	<ul style="list-style-type: none"> Distribución de la compresión mejorada en la zona final de la media Forma anatómica Prevención de constricciones circulatorias

ELEMENTOS AÑADIDOS	APLICACIONES	FUNCIONAMIENTO
Pieza de liga de sujeción 	<ul style="list-style-type: none"> En caso de tejido muy blando Forma cónica acentuada 	<ul style="list-style-type: none"> Sujeción adicional Evita del deslizamiento
Cremallera 	<ul style="list-style-type: none"> Afecciones secundarias como reuma, artritis, etc. En caso de paresia flácida 	<ul style="list-style-type: none"> Más fácil de poner y de quitar
Almohadilla linfática incorporada 	<ul style="list-style-type: none"> Crecimiento local del edema o endurecimiento Divergencias del estándar anatómico 	<ul style="list-style-type: none"> Aumento la presión localizada Prevención de edemas y endurecimientos
Guante sin costuras 	<ul style="list-style-type: none"> Linfedemas de leves a moderados en los dedos Edemas de leves a moderados en el dorso de la mano 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de edemas en los dedos y el dorso de la mano
Guante con costuras 	<ul style="list-style-type: none"> Edemas de moderados a intensos en los dedos Edemas de moderados a intensos en el dorso de la mano 	<ul style="list-style-type: none"> Prevención de edemas en los dedos y el dorso de la mano

ACCESORIOS VenoTrain®

Para que los pacientes se sientan 100% cómodos con sus medias de compresión VenoTrain, ponemos a su disposición una completa gama de accesorios VenoTrain. Ayudan al tratamiento, facilitan el manejo y cuidan las medias de compresión, así como la piel de sus clientes.



01



02



03

01 Bolsa de medición

Para que la medición sea más sencilla: jaboncillo de sastrer, medidor de dedos, lápiz de ojos, sacapuntas, cinta métrica, guante especial para colocar las medias de compresión con más facilidad, VenoTrain glider, bolígrafo

02 Bolsa de lavado

Para almacenar de manera segura las medias de compresión cada vez que la laves en la lavadora

03 Guantes especiales Bauerfeind

Ayudan a colocar correctamente las medias de compresión

04 Paquete de inicio

Práctico y útil kit de accesorios de ayuda durante el uso diario de las medias de compresión (p. ej., guantes, red de lavado, carné de cliente)



04

VenoTrain® glider ELEMENTO AUXILIAR COMPACTO PARA LA COLOCACIÓN DE MEDIAS

receta-
bles

VenoTrain glider es una práctica ayuda para la colocación de todo tipo de medias de compresión medicinales, y la puede recetar el médico.


El material ligero y resistente permite deslizar las medias sin esfuerzo sobre el brazo o la pierna. Está especialmente indicado para medias de compresión con puntera abierta y cerrada.

Ahorra tiempo y espacio, por lo que resulta perfecto para llevar de viaje.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- Extremadamente ligera, estable y resistente a los desgarros
- Fácil de manejar
- Ideal para viajes
- De prescripción con receta

ENCONTRARÁ LOS VÍDEOS
CON LAS INSTRUCCIONES
DE COLOCACIÓN EN:
video.bauerfeind.com

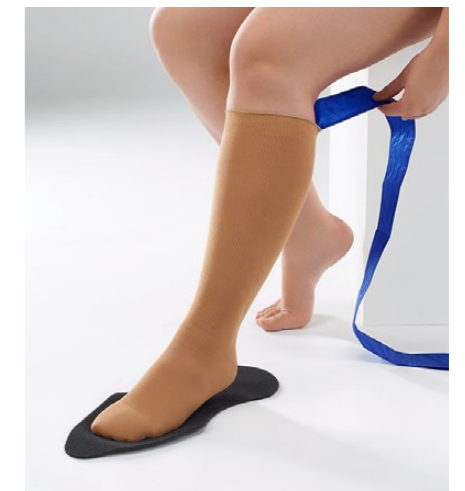



PRESTACIONES ADICIONALES MODIFICACIONES | REPARACIONES SERVICIO INDIVIDUAL AL CLIENTE

MODIFICACIONES | REPARACIONES

● SERIE

		soft Brazo	impuls Pierna
Borde superior de la media	Renovación de la liga	●	●
	Borde de punto en la liga	●	●
	Liga	●	●
	Retirar la parte para la cadera y cosido de la liga		●
AGHB	Renovación de la correa para la cadera		●
Acortar media	AD/CG máx. en 3 cm	●	●
	AG máx. en 5 cm		●
Reparación, si es posible	Agujero	●	●
	Carrera en la media	●	●
	Costura	●	
	Hilo salido	●	●

PEDIDO NUEVO

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

	Unidad	impuls	delight
Tejido de la puntera Alargar o acortar	Pieza	○	
Puntera Costura por el exterior	Pieza	○	○
Puntera Más ancha, más estrecha, anatómica	Pieza	○	○
Parte abdominal Delante / detrás – dos costuras	Pieza	○	
AT Con entrepierna para caballero (sin abertura o con abertura longitudinal)	Pieza	○	
AT Con refuerzo en entrepierna	Pieza	○	
Cosido con almohadilla de espuma	Pieza		○

MODIFICACIONES | REPARACIONES

○ CONFECCIÓN A MEDIDA

		impuls Pierna	delight Pierna
Borde superior de la media	Renovación de la liga	○	○
	Borde de punto en la liga	○	○
	Estrechar o ensanchar la liga	○	○
	Retirar la parte para la cadera y cosido de la liga	○	○
AT	Acortar parte abdominal	○	○
	Alargar la parte abdominal (a excepción de ATX)	○	
	Estrechar la cuña (a excepción de ATX)	○	
	Ensanchar la cuña (a excepción de ATX)	○	
	Refuerzo en entrepierna y muslos (a excepción de ATX)	○	
	Cambiar AT por AG con liga	○	
AGHB	Renovación de la correa para la cadera	○	○
	Acortar media		
	AD máx. en 3 cm	○	○
	AG máx. en 5 cm	○	○
Cambiar color de claro a oscuro*		○	○
Modificación en la puntera	Cambiar puntera cerrada a abierta	○	○
	Acortar puntera abierta	○	○
Reparación, si es posible	Agujero	○	○
	Carrera en la media	○	○
	Costura	○	○
	Hilo salido	○	○

MODIFICACIONES | REPARACIONES

○ VenoTrain® curaflow

Modificación	Tratamiento	
	Pierna	Brazo
Pantis		
Parte abdominal		
Incorporación posterior de una pieza en U, solo para zonas abdominales de compresión		
Acortar parte abdominal	○	
Abertura para estoma en la parte abdominal		
Terminación en la cintura		
Cuña		
AT en AG con fijación a la cadera	○	
AT en CT, ET o FT	○	
AT en AG con liga de sujeción	○	
Pierna / Brazo		
Acortar media (ribete)	○	○
Liga de sujeción / cinturilla / ceñidor		
Coser piezas de liga de sujeción nuevas		
Unir una liga de sujeción / cinturilla nuevas		
Estrechar o ensanchar liga de sujeción máx. 5 cm	○	○
Cambiar fijación a la cadera a AG con liga de sujeción		
Modificar hombrera a CG con liga de sujeción		
Ceñidor nuevo para la fijación a la cadera / hombrera (desgastada)		
Cosido de fijación a la cadera en medias para piernas hasta G	○	
Cosido de hombrera en CG		○
Almohadilla linfática / forro	○	○
Acabado	○	○
Pie (por cada pie)		
Modificaciones puntera / modificaciones longitud del pie	○	
Estrechar medida cA	○	
Integrar piezas de liga de sujeción en caso de cA	○	
Pulgar del pie separado del capuchón para los dedos (solo para capuchones con costura)	○	
Modificaciones mano		
Dedos de la mano separados (no en caso de AC1 sin costura)		○
Acortar / estrechar guante (solo guantes con costura)		○
Integrar / modificar posteriormente una almohadilla linfática		○
Reparaciones / adaptaciones		
Reparar costura	○	○
Reparar carrera	○	○
Reparación de agujeros e hilos saltados	○	○
Incorporación de cremallera		
Cambio de color (solo para productos sin usar)	○	○

* Por favor, **no** se pruebe las medias. Una vez que han entrado en contacto con la piel ya no es posible el cambio de color.

RECOMENDACIONES PARA LA PRESCRIPCIÓN

EJEMPLOS DE RECETA

EJEMPLO DE RECETA
TRATAMIENTO DE LAS PIERNAS

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

I89.01: Lipoedema, estadio II

VenoTrain curaflow, panti de compresión medicinal, 1 unidad AT con cinturilla, Ccl 2, pie oblicuo cerrado, terminación oblicua, elevación de la pierna delantera, zona funcional en la rodilla, confección a medida tejido plano

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (10.2014)

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernnummer

Todos los elementos añadidos médicamente necesarios deben ser recetados

LA RECETA DEBE INCLUIR:

- Números de producto ortopédico
- Diagnóstico
- Número de medias (unidad / par)
- Nombre del producto (opcional)
- Clase de compresión (Ccl)
- Largo o modelo de la media
- Elementos añadidos (terminaciones oblicuas, fijaciones, ligas de sujeción adicionales, almohadillas, etc.)
- Indicación para la confección a medida (p. ej. tejido plano)

Debido a que en cada clase de compresión existen materiales de diferente elasticidad y efectividad, resulta útil contar con una nomenclatura (Directriz S2k: Terapia de compresión médica número de registro de la AWMF: 037/005)*.

En casos particulares, puede existir una combinación entre diferentes medias o calcetines de compresión. Este tipo de combinaciones pueden, por ejemplo, crearse por dos medias de compresión utilizadas una encima de la otra, si la colocación de una sola media de compresión causa problemas en la elevada clase de compresión necesaria.

* Directriz S2k: Terapia de compresión médica de las extremidades con medias de compresión medicinales, vendaje compresivo flebológico y sistemas de compresión adaptativos médicos, n.º de registro de la AWMF 037/005.

** Directriz S2k Diagnóstico y terapia del linfedema, Sociedad alemana de flebología V., n.º de registro AWMF 058-001

Otras posibilidades de combinación pueden ser, p. ej., la utilización de pantalones piratas de compresión con una media corta de compresión, o bien una bermuda de compresión con una media larga de compresión (ver el directorio de productos ortopédicos de la asociación alemana de la seguridad social "GKV-Spitzenverband").

Con una intensidad de uso media, debería poder garantizarse una presión de compresión efectiva durante seis meses. Por razones de higiene, **es necesario un cambio de medias**. En el caso de realizar trabajos físicos exigentes, así como en caso de alteraciones significativas de las medidas corporales, puede que sea necesaria una nueva receta antes de tiempo (Directriz S2k sobre Diagnóstico y tratamiento del linfedema, número de registro de la AWMF 058-001)**.

CONSEJO:

Si desea información detallada sobre la receta, póngase directamente en contacto con nosotros en cualquier momento. Le proporcionaremos los materiales correspondientes.

Bloc de receta pierna

N.º de art. 271 2010 2010 001

Bloc de receta brazo

N.º de art. 271 2010 2010 002

HOJAS DE PEDIDO

¡Nuestras hojas de pedidos especiales le facilitan el trabajo diario!
Le enviaremos estas hojas de pedido de manera gratuita.

Por supuesto, si lo desea también puede descargar las distintas hojas de pedido en cualquier momento:
bauerfeind.com/downloads

BLOC HOJAS DE PEDIDO PRODUCTOS EN SERIE Y A MEDIDA

		Número de artículo
VenoTrain	Hoja de pedido a medida en el anverso, hoja de pedido en serie en el reverso	271 2020 0000 005

HOJAS DE PEDIDO PRODUCTOS A MEDIDA

		Número de artículo
Tratamiento con tejido de circular	VenoTrain	271 2020 0000 002
	VenoTrain soft brazo	271 1220 3020 001
Tejido plano	VenoTrain delight pierna	271 2020 0000 003
	VenoTrain curaflow pierna	271 4220 7000 001
	VenoTrain curaflow dedos	271 4220 7000 002
	VenoTrain curaflow brazo / mano	271 4220 7000 003

OTRAS ÁREAS DE PRODUCTOS DE BAUERFEIND



LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN VENOTRAIN (tejido circular) destacan por su efectividad clínicamente probada y las propiedades únicas de sus materiales. Mejoran la actividad venosa y actúan frente a molestias de tipo venoso en las piernas. Como medias de compresión medicinales para trastornos venosos de leves a avanzados, pero también como medias preventivas en el trabajo o durante el viaje, la gama VenoTrain ofrece la media adecuada para cada caso. Gracias a una amplia selección de colores y diseños, se pueden combinar de maravilla e ir a la moda.



Los VENDAJES Y ORTESIS

de Bauerfeind ayudan después de sufrir lesiones, así como en caso de afecciones ortopédicas crónicas y agudas. Mejoran la sensación de estabilidad y dan una impresión de seguridad en las actividades diarias y en la práctica deportiva. Para ayudar óptimamente a la fisioterapia, los vendajes y ortesis están confeccionados con materiales livianos y transpirables. Gracias a soluciones innovadoras como los cierres rápidos o los elementos auxiliares de colocación integrados, son fáciles de manejar en el día a día y convencer por su máxima calidad «Made in Germany».



Los pies son la base del cuerpo. Las **PLANTILLAS ORTOPÉDICAS** descargan los pies, las articulaciones de la rodilla y de la cadera, así como la espalda. Sirven de soporte al pie en su funcionamiento natural y, así, pueden ejercer una acción biomecánica positiva en el cuerpo.

Porque cada pie tiene sus propias necesidades, Bauerfeind tiene más de 300 modelos distintos.

Encontrará una vista general de todas las áreas de tratamiento en Internet en: experts.bauerfeind.com

CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA DE BAUERFEIND AG (TCG)

Precios

Los precios indicados son precios netos en euros ex fábrica y no incluyen el IVA legal.

Envío

El envío corre por cuenta y riesgo del comprador, aunque éste no se haga cargo de los gastos de transporte. Las interrupciones operacionales que puedan afectarnos a nosotros o a nuestros proveedores, la falta de personal capacitado, posibles huelgas, cierres patronales y acontecimientos de fuerza mayor son causas de retraso en la entrega y nos eximen de cualquier obligación de entrega durante el tiempo de dicho impedimento.

Gastos de envío

Calculamos nuestros gastos de envío como tarifa plana de 7,00 euros para un valor total neto del pedido de hasta 50,00 euros, y de 4,00 euros para un valor total neto del pedido de hasta 200,00 euros. No se aplicarán gastos de envío cuando el pedido contenga productos a medida. Los gastos de envío especiales se cobrarán a precio de coste.

Devoluciones

Las devoluciones fuera de los plazos de garantía solo se aceptarán previo aviso y aprobación por nuestra parte, siempre que se presenten los documentos de entrega originales; se entiende que la mercancía devuelta está en buen estado. Nos reservamos el derecho a denegar la aceptación de cualquier remesa devuelta. Salvo en caso de garantía, cobramos los gastos de tramitación de las devoluciones. Para las devoluciones en el plazo de un mes desde la fecha de entrega, este cargo es de 10,00 euros por cada envío de devolución. Para las mercancías devueltas un mes o más después de la fecha de entrega, se cobra una tasa de tramitación del 20 por ciento del valor neto del pedido, o un máximo de 25,00 euros por producto y unidad; para las devoluciones entre seis y doce meses después de la fecha de entrega, la tasa es del 40 por ciento del valor neto del pedido, o una tasa máxima de 50,00 euros por cada producto y unidad.

No se aceptarán devoluciones de productos fuera del periodo de garantía o 12 meses o más después de la fecha de entrega. No se aceptarán devoluciones de productos confeccionados a medida.

Pagos

A menos que se acuerde lo contrario de forma individual y por escrito, los pagos deben efectuarse inmediatamente después de la entrega. Ofrecemos un descuento del 4 por ciento para los pagos realizados por domiciliación bancaria y un descuento del 3 por ciento para los pagos realizados dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la factura. Por lo demás, el plazo de pago es de 30 días netos. Se considerará que el comprador ha incurrido en mora una vez transcurridos 30 días desde la fecha de la factura. A partir de ese momento, cualquier otra entrega se efectuará únicamente previo pago por adelantado. A partir del momento en que se retrase el pago, cobraremos un interés de demora del ocho por ciento por encima del tipo de interés básico aplicable. Los pagos por cheque, giro bancario, etc., se consideran realizados cuando el importe ha sido finalmente abonado en nuestra cuenta.

Retención de propiedad

Nosotros conservamos la propiedad de toda la mercancía hasta que el comprador haya abonado todos los montos pendientes conforme a nuestra relación comercial con él. La reserva de propiedad también se aplicará proporcionalmente a las mercancías que hayan sido procesadas o modificadas de cualquier otro modo. En caso de venta de la mercancía, todas las reclamaciones de terceros se considerarán cedidas a nosotros sin reservas hasta el importe total que nos corresponda.

Sin perjuicio de dicha asignación, el comprador tiene el derecho al cobro de dichas cantidades. Nuestro derecho a cobrar las cantidades no se ve afectado por la disposición anterior; sin embargo, nos comprometemos a abstenernos de dicho cobro a menos que el comprador incumpla sus obligaciones de pago. Si el comprador incumple sus obligaciones de pago, podemos exigir al comprador que

revele los créditos asignados y los nombres de los deudores, proporcione toda la información necesaria para el cobro de la deuda, entregue todos los documentos necesarios e informe a los deudores (terceros) de la asignación. El comprador no tendrá derecho a vender, empeñar o ceder la mercancía como garantía. Los empeños, confiscaciones o cualquier otra disposición tomada por un tercero deberán ser comunicados sin demora por el comprador, y se facilitará toda la información y los documentos necesarios para que podamos defender nuestros derechos. Nos comprometemos a liberar, a petición del comprador, cualquier garantía que exceda un crédito garantizado que no se haya reembolsado en más del 20 %.

Reclamaciones

Las reclamaciones de garantía en relación con defectos evidentes serán nulas si no recibimos una notificación inmediata por escrito de estas reclamaciones de acuerdo con el artículo 377 del Código de Comercio alemán (HGB). Los derechos de garantía también prescribirán un año después de la entrega de la mercancía adquirida. Si el producto es defectuoso se procederá, según nuestro criterio, a una entrega de sustitución o a una reparación. Por razones de higiene, las reparaciones solo se realizarán en productos que hayan sido lavados o se encuentren completamente higienizados. En caso de recibir productos no lavados, nos reservamos el derecho a reclamar una suma adecuada por trabajos adicionales. En caso de que cumplamos con nuestras obligaciones de cumplimiento posterior, especialmente en lo que respecta a la reparación de los defectos o a la entrega de la mercancía sin defectos, el cliente no podrá exigir una reducción del precio ni rescindir el contrato, a menos que nuestros intentos de cumplimiento posterior hayan fracasado. Los defectos causados por el desgaste normal, el uso excesivo, el mal uso, la falta de cuidado o el incumplimiento de las instrucciones de uso, no están cubiertos por la garantía.

Responsabilidad

A menos que se produzca un comportamiento gravemente negligente o doloso por nuestra parte o por la de nuestros representantes o agentes, queda excluida la responsabilidad por daños y perjuicios. Esta limitación de la responsabilidad no se aplicará a los daños debidos a lesiones contra la vida, la integridad física o la salud, ni a la violación de una obligación contractual esencial.

Lugar de jurisdicción

El lugar de cumplimiento de la entrega es la sede de nuestra empresa. El lugar de jurisdicción para todos los litigios derivados de la relación comercial es Gera, Alemania.

Cláusula de separabilidad

El hecho de que alguna disposición individual de estas condiciones de venta y entrega sea o se convierta en inválida, no afectará a la validez de las disposiciones restantes. La disposición no válida será reemplazada por una disposición válida que refleje lo más fielmente posible la intención económica original de las partes.

Cláusula de protección de datos / grabación de conversaciones

Por motivos de calidad entre otros, grabamos y registramos las llamadas, los faxes, los correos electrónicos y la correspondencia entre el comprador y nuestros empleados. Todas las grabaciones están al servicio de las disposiciones legales, que deben cumplirse con los productos médicos solicitados. Las grabaciones se borrarán automáticamente de acuerdo con las disposiciones legales. Ninguno de los datos grabados será revelado a terceros, si no es necesario por decisión judicial o a petición de las autoridades fiscales o sanitarias locales. El comprador da su consentimiento para que se realicen dichas grabaciones y registros.

Para más información sobre la última versión de la Política General de Protección de Datos de Bauerfeind AG, consulte www.bauerfeind.de/ds.

Última actualización: febrero 2022

AVISOS DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Toda la información contenida en este folleto está actualizada en el momento de la impresión. Este folleto ofrece, dependiendo de la presentación, una primera visión general del campo de especialidad y sugiere opciones de diagnóstico / tratamiento médico seleccionadas. Aunque tienen una base científica, las presentaciones no pretenden ser completas ni presentar todas las doctrinas. Todo el contenido de este folleto / o su presentación en línea, incluyendo extractos del mismo, en particular los relacionados con el diagnóstico y las formas de tratamiento (textos, imágenes, gráficos, etc.), deben entenderse como un apoyo no vinculante para la terapia que debe seleccionar el médico y el personal competente. Este folleto no pretende sustituir la necesaria anamnesis personal y su valoración profesional global por parte de un médico / especialista debidamente formado y cualificado, incluyendo las terapias ya en curso.

El contenido del folleto está dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios, y no a personas no especializadas, particularmente pacientes.

En caso de duda, rogamos solicite asesoramiento profesional adicional, aunque también estaremos encantados de ofrecerle nuestra ayuda.

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA TUS PACIENTES!

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia que hacernos?
No dude en contactarnos:

BAUERFEIND IBÉRICA, S.A.

C/ San Vicente Mártir, nº

71 - 4º -7ª

46007 Valencia

P +34 96 385-6633

F +34 96 385-6699

E info@bauerfeind.es



BAUERFEINDSPAIN



BAUERFEIND IBÉRICA S.A.