


Montageanweisung CoxaTrain® mit Beckenschale


Ergänzung der Gebrauchsanweisung /

Anpassen der CoxaTrain, Seite 3

Verbinden von Beckenbandage inklusive Beckenschale und seitlicher Hüftschale mit Gelenkschiene

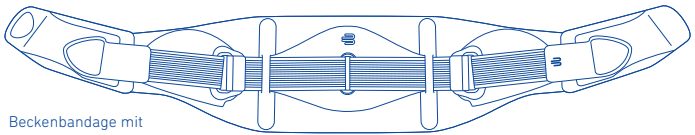

Beckenbandage mit
integrierter Beckenschale

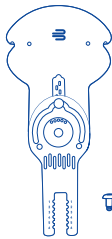


Hüftschale mit Gelenkschiene




Kunststoffniet:

Für eine einseitige Versorgung mit einem Gelenk ist nur ein Niet erforderlich. Bei einer beidseitigen Versorgung wird der zweite Niet benötigt.

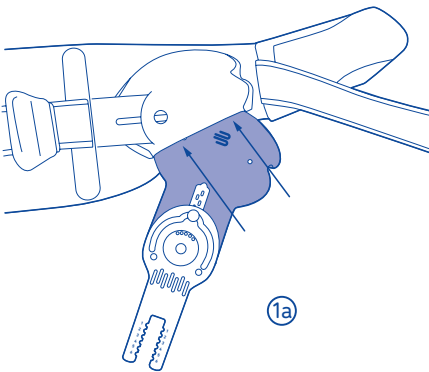



1a

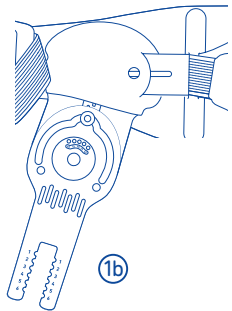

1b

Schieben Sie zunächst die Hüftschale mit der Gelenkschiene entsprechend der zu versorgenden Seite in die dafür vorgesehene aufgeschweißte Tasche an der Beckenbandage ein (1a 1b), dabei zeigt das Bauerfeind Logo »B« auf der Hüftschale nach außen (vom Körper weg). Überprüfen Sie, dass alle Zacken der Hüftschale der Gelenkschiene in der aufgeschweißten Tasche eingesteckt sind.


Hinweis: Die Hüftschale mit Gelenkschiene muss unter die integrierte Beckenschale. Optional kann die Beckenschale vor Einschieben der Hüftschale mit Gelenkschiene aus der Tasche gefädelt werden.

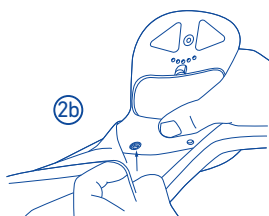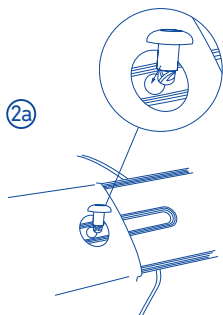


Fixieren Sie nun mit dem zweiteiligen Kunststoffniet 2a) die zirkuläre Beckenschale mit der seitlichen Hüftschale inkl. Gelenkschiene 2b) 2c).

Hinweis:

Für eine einseitige Versorgung mit einem Gelenk ist nur ein Niet erforderlich.
Die Montagestelle ist mit einem Loch in der Textiltasche vorgestanzt.

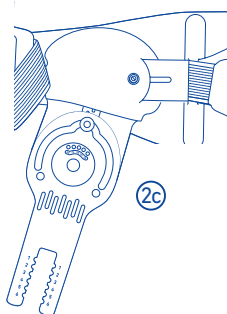

Dann fädeln Sie die zwei blauen Zuggurte durch die jeweiligen Umlenkschnallen und kletten diese auf die Hüfttaschen bzw. Bauchverschlüsse.

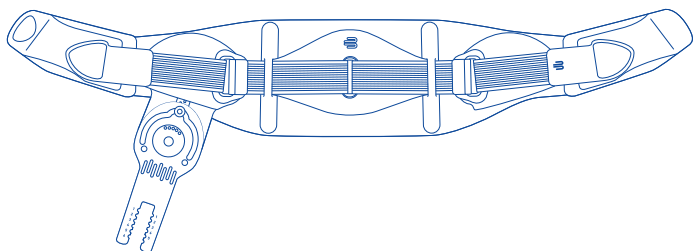

Zur weiteren Montage des Oberschenkelgestricks beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung / Anpassen der CoxaTrain / Fachpersonal, Seite 3.

BAUERFEIND AG
 Triebeser Straße 16
 07937 Zeulenroda-Triebes
 Germany

P +49 (0) 36628 66-40 00
 F +49 (0) 36628 66-44 99
 E info@bauerfeind.com

Rev.1 – 2023-10_115110